



BRAZO



D.E.M.A.

Cabestrillo con faja tipo velpeau

CODIGO DE PRODUCTO: C025

FINALIDAD

Contener, inmovilizar y posturar en todos los planos a la articulación de hombro. Especialmente alineando el húmero y evitando la flexión, abducción y rotaciones internas y externas del hombro.

USOS GENERALES

Luxaciones, subluxaciones, traumatismos, tendinopatias, fracturas, postquirúrgicos, tendinitis, tenosinovitis, entesitis moderada o severa y post operatorios.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas como fracturas de humero sin indicación quirúrgica, luxaciones y subluxaciones de hombro, fracturas de codo que requieran tratamiento conservador, tendinitis, tenosinovitis, entesitis moderadas o severas, fracturas de antebrazo sin indicación quirúrgica. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica. Situaciones en las que se precisen recuperar la movilidad del rango articular de hombro y/o el codo, (capsulitis, hombro congelado, residuos flexores de codo).

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



PRECAUCIONES

Limitación de rango articular de hombro o codo por uso prolongado y permanente. Hipotrofia y debilidad muscular por uso excesivo.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Algodón 100% con interior acolchado.
Contiene 1 unidad.




CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

MEDIDAS

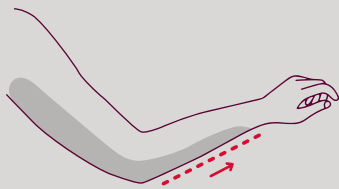

Para conocer tu talla, medí el largo de antebrazo y peso.

UNISEX
IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	PESO	ANTEBRAZO
P	hasta 50 KG	25 cm
A	hasta 90 KG	27 cm
EG	hasta 120 KG	

INSTRUCCIONES DE USO



1. Ubicar el brazo a 90° dentro de la prenda.



2. Pasar ambas tiras hacia atrás por encima de los hombros y deslizarlas por la espalda formando una cruz.



3. Llevarlas hacia adelante por la cintura y cerrar en la prenda.



4. Ajustar la altura del cabestrillo con las hebillas.



5. Colocar la sobre banda inmovilizadora alrededor del tórax para sujetar al brazo lesionado. Las almohadillas deben quedar posicionadas en los hombros para evitar malestares.



6. Cerrar con el abrojo.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Asociación Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica

