



Faja de contención

CODIGO DE PRODUCTO: F033

FINALIDAD

Asistencia a los tejidos y músculos abdominales. Contener y posturar la musculatura de tronco a nivel lumbar y dorsal bajo con la posibilidad de regulación de ajuste según la necesidad.

USOS GENERALES

Lumbalgias, distensiones de la musculatura lumbar, esguinces, contención de los músculos de pared anterolateral, post quirúrgicos, post parto, hernias, eventraciones abdominales, contracturas, dolores crónicos, artrosis, distensiones y eventraciones. Se recomienda su uso por encima de una prenda de algodón.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas, lumbalgias, distensiones de la musculatura lumbar y esguinces. Contención de los músculos de la pared anterolateral de tronco, post quirúrgicos de abdomen o post parto. Hernias y eventraciones abdominales no complicadas. Si lo desea, consulte a su médico.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CONTRAINDICACIONES

Debilidad severa de los músculos de la cincha abdominal, patologías de resolución quirúrgica.

PRECAUCIONES

Debilidad muscular por uso excesivo e inactividad, reacciones dermatológicas por sudoración de la zona.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Poliéster 52% - Goma 29% - Nylon 19%.

Interior confeccionado con tela afelpada.

Posee doble cierre de contención abdominal registrado.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

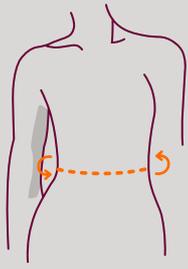

Para conocer tu talle, medí la circunferencia de tu cintura.

UNISEX

Altura 24 / 28 cm

TALLE

CINTURA

1	60 cm hasta 85 cm
2	77 cm hasta 115 cm
3	100 cm hasta 135 cm
4	115 cm hasta 160 cm
5	130 cm hasta 170 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Ubicar la faja alrededor de la zona lumbar.



2. Cerrar el abrojo en el medio del abdomen.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos

 **D.E.M.A.**
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618

 @dema.argentina

 home.dema-argentina.com.ar

 **anmat**
Asesoría Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

 **ISO**
9001
International Organization for Standardization