



# D.E.M.A.

## Faja maternal

CÓDIGO DE PRODUCTO: F040

### FINALIDAD

Asistencia a los tejidos y músculos abdominales. Contener y posturar los músculos de la cincha abdominal inferior y del raquis lumbar durante el embarazo o el puerperio.

### USOS GENERALES

Meses de embarazo, lumbalgias, post parto, pacientes con aumento del contenido abdominal. Se recomienda el uso por encima de una prenda de algodón.

### INDICACIONES

Indicada durante los meses del embarazo en caso de lumbalgias o necesidades de contención abdominal. Pacientes que presenten aumento del contenido abdominal por diversas causas. Si desea, consulte a su médico.

### CONTRAINDICACIONES

Patologías que tengan indicación quirúrgica para su resolución. Debilidad severa de los músculos del tronco a nivel lumbar.

### GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



### PRECAUCIONES

Propensión a la debilidad de la musculatura contenida por uso excesivo e inactividad. Alergia a algún componente del producto.

### CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



### CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Poliéster 52% - Goma 29% - Nylon 19%.

Confeccionada en tela afelpada en su interior.

Contiene 1 unidad.



### CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



### ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

## MEDIDAS

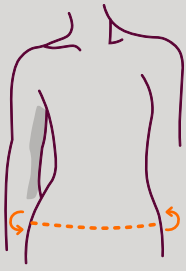

Para conocer tu talle, medí la circunferencia de tu cintura baja.

**UNISEX**

Altura 16 cm

**TALLE**

0

Único

**CINTURA**


68 cm hasta 110 cm

85 cm hasta 140 cm

## INSTRUCCIONES DE USO



1. Ubicar la faja bajo el abdomen.
2. Llevar los extremos hacia atrás y cerrar el abrojo en la espalda a la altura del sacro.

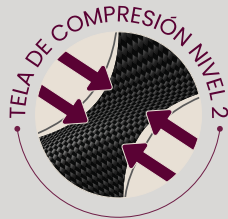


**D.E.M.A. Respalda tus movimientos**

 **D.E.M.A.**  
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,  
contanos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

**anmat**  
Administración Nacional de Medicamentos,  
Aparatos y Tecnología Médica

