



# Inmovilizador de dedo meñique de neoprene

CODIGO DE PRODUCTO: 1010

## FINALIDAD

Inmovilizar la totalidad de las articulaciones del dedo meñique desde la carpometacarpiana hasta las interfalángicas distales.

## USOS GENERALES

Artrosis de meñique, esguince, fracturas simples del quinto metacarpiano o de las falanges del meñique, recuperación de lesiones y post operatorios.

## INDICACIONES

Necesidades de inmovilización y reposo absoluto. Si lo desea, consulte a su médico.

## CONTRAINDICACIONES

Patologías traumatológicas que requieran resolución quirúrgica. Alergia a alguno de los componentes de producto.

## GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



## PRECAUCIONES

Lesiones por ajuste excesivo. Hipotrofias musculares por uso prolongado.

## CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



## CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.  
Incluye una varilla de contención.  
Contiene 1 unidad.



## CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



## ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

## MEDIDAS



Para conocer tu talla, medí la circunferencia de la palma a la altura de los nudillos y muñeca.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	PALMA (A)	MUÑECA (B)
0	14/18 cm	14/18 cm
1	18/22 cm	16/20 cm
2	20/24 cm	18/22 cm
3	22/28 cm	20/26 cm
4	24/30 cm	22/30 cm

## INSTRUCCIONES DE USO



**1.** Introducir la mano en el orificio de la muñequera.



**2.** Posicionar el meñique entre las varillas y el pulgar en el lateral. Malear la varilla de contención según la necesidad de uso.



**3.** Cerrar el abrojo en la muñeca y ajustar el lazo que se encuentra en el extremo del dedo lesionado.



**D.E.M.A. Respalda tus movimientos**

**D.E.M.A.**  
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,  
contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat  
Asociación Nacional de Maqueros  
Aparatos y Tecnología Médica

