



Inmovilizador de muñeca y pulgar de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: 1011N

FINALIDAD

Inmovilizar las articulaciones de la muñeca y de pulgar, limitando el movimiento de flexo-extensión de dichas articulaciones.

USOS GENERALES

Esguinces severos, tendinitis que afectan tendones flexores o extensores del carpo, dedos y tendinitis de quervain de grado severo. Recuperación de post operatorios, esguinces y distensiones.

INDICACIONES

Patologías que requieran limitación total de la movilidad de muñeca y pulgar con contención antebraquiopalmar. Esguinces severos, tendinitis que afectan tendones flexores o extensores del carpo, dedos y tendinitis de quervain de grado severo. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Procesos que requieran tratamiento quirúrgico. Alergia a alguno de los componentes de producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



PRECAUCIONES

Lesiones por ajuste excesivo. Hipotrofias musculares por uso prolongado.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 mm de espesor.

Incluye 5 ballenas internas de contención.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

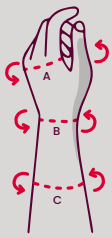

Para conocer tu talle, medí la circunferencia de la palma a la altura de los nudillos, muñeca y antebrazo.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	(A) PALMA	(B) MUÑECA	(C) ANTEBRAZO
0	14/20 cm	10/16 cm	12/20 cm
1	16/26 cm	14/24 cm	16/26 cm
2	18/30 cm	16/28 cm	18/30 cm
3	20/34 cm	18/32 cm	20/34 cm

INSTRUCCIONES DE USO





1. Abrir la prenda y posicionarla desde el pulgar hasta el antebrazo.

2. Cerrar los lazos en abrojo rodeando el antebrazo, muñeca y palma.



3. Ajustar la tira superior alrededor del dedo pulgar para inmovilizarlo.

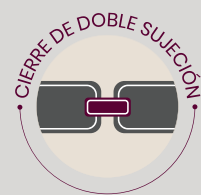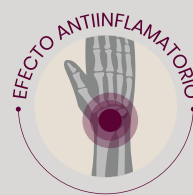

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

