



**D.E.M.A.**

**IN MOTION**

## Muñequera tubo con ajuste de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: M011

### FINALIDAD

Estabilizar y contener la movilidad articular de la muñeca con posibilidad de regulación de la compresión deseada.

### USOS GENERALES

Edema de la articulación, artritis, artrosis, esguinces, recuperación de tendinitis, torceduras, inestabilidades y post operatorios. Prevención de lesiones en las prácticas deportivas.

### INDICACIONES

Patologías que requieran limitar los movimientos de muñeca en forma progresiva, teniendo la posibilidad de realizar ajustes según la necesidad. Brinda calor con efecto térmico, analgésico. Si lo desea, consulte a su médico.

### CONTRAINDICACIONES

Alergia a alguno de los componentes del producto.

### GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

### PRECAUCIONES

Lesiones por ajuste excesivo o por mal uso.

### CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



### CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene 4 milímetros.

Incluye un ajuste en abrojo.

Contiene 1 unidad.



### CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



### ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

## MEDIDAS



Para conocer tu talla, medí la circunferencia de muñeca.

**UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO**

Altura 8 cm

TALLE

MUÑECA

1  
2  
3  
4

15 cm hasta 18 cm  
17 cm hasta 20 cm  
19 cm hasta 23 cm  
21 cm hasta 27 cm


## INSTRUCCIONES DE USO



1. Introducir la mano por el interior de la prenda.

2. Posicionarla en la muñeca.

3. Ajustar el abrojo.

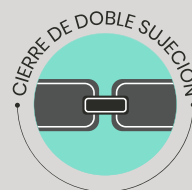

**D.E.M.A. Respalda tus movimientos**

**D.E.M.A.**  
**IN MOTION**



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,  
contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat  
Asociación Nacional de Maquinos  
Alimentos y Tecnología Médica

