



Tobillera regulable de neoprene

CODIGO DE PRODUCTO: T051

FINALIDAD

Estabilizar y contener las estructuras anatómicas que forman parte de la articulación del tobillo permitiendo un ajuste gradual de la zona afectada por cambios de volumen en dicha zona secundarios a edema.

USOS GENERALES

Hiperlaxitud ligamentaria, traumatismos, esguinces, artritis, distensiones, torceduras, tendinitis, distensiones, bursitis, desgarros, inflamaciones, esguinces, recuperación de lesiones y post operatorios. Contención a los movimientos del tobillo, asiste a los ligamentos y las articulaciones. Brinda a la articulación estabilidad y contención. El material en neoprene ofrece calor terapéutico con efecto antiinflamatorio. Para uso deportivo y actividades habituales.

INDICACIONES

Situaciones en las que se requiera contener los movimientos articulares del tobillo. Patologías inflamatorias agudas o crónicas como tendinitis, distensiones ligamentarias, artritis y sinovitis de tobillo leves. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica o que precisen mayor grado de contención y estabilización. Alergia a alguno de los componentes del producto.



PRECAUCIONES

Compresión excesiva o insuficiente por talla inadecuado.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.

Cierre en abrojo.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

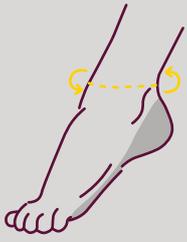

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de tobillo.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE

Único

TOBILLO

hasta 31 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Abrir la prenda.
2. Ubicarla en la planta del pie.
3. Cerrar rodeando el empeine y el tobillo.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos

 **D.E.M.A.**
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Asociación Nacional de Maquilleros,
Armeros y Tecnología Médica

