



# Tobillera con varilla rígida de neoprene

CODIGO DE PRODUCTO: T053

## FINALIDAD

Contener y limitar parcialmente la articulación del tobillo en sentido medio lateral.

## USOS GENERALES

Tendinitis, distensiones ligamentosas, sinovitis, artritis, traumatismos, contusiones, esguinces y post operatorios. Brinda a la articulación estabilidad y contención ligamentaria. El material en neoprene brinda calor terapéutico y antiinflamatorio. Para uso en actividades cotidianas.

## INDICACIONES

Patologías traumatológicas y reumatológicas que presenten inestabilidad de la articulación del tobillo, hiperlaxitud articular, debilidad muscular. Esguinces, entorsis, tendinitis, traumatismos, contusiones, artritis. Si lo desea, consulte a su médico.

## CONTRAINDICACIONES

Síndromes de estabilidad articular severos que requieran otro tipo de tratamiento. Alergia a alguno de los componentes del producto.

## GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



## PRECAUCIONES

Hipotrofia muscular por uso prolongado y excesivo.

## CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



## CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.

Incluye varillas de contención rígidas laterales.

Ajuste en abrojo.

Contiene 1 unidad.



## CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



## ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

## MEDIDAS

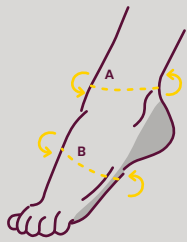

Para conocer tu talla, medí la circunferencia del tobillo y empeine.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	TOBILLO (A)	EMPEINE (B)
1	18/20 cm	20/26 cm
2	22/24 cm	22/28 cm
3	24/28 cm	24/30 cm
4	26/30 cm	26/32 cm

## INSTRUCCIONES DE USO



**1.** Introducir la prenda desde el pie.



**2.** Ubicarla en el tobillo.



**3.** Centrar el orificio en el talón.





**4.** Ajustar el abrojo.



**5.** Posicionar las varillas en los laterales.



**6.** Cerrar el abrojo.

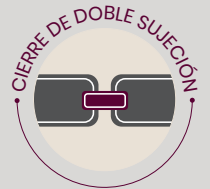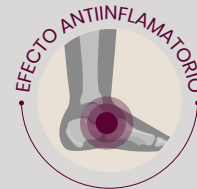

**D.E.M.A. Respalda tus movimientos**

**D.E.M.A.**  
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat  
Asociación Nacional de Maestrías  
Aparatos y Tecnología Médica

